

Intensive Dekontamination der Dentaleinheit mit Metasys GREEN&CLEAN BR

1. Entfernen Sie alle Instrumente (z.B. Turbinen, Motoren, Handstücke) von den Instrumentenschläuchen mit Ausnahme der Luft-Wasser-Spritze, um sie vor Verstopfungen zu schützen.
2. Ca. 250 ml GREEN&CLEAN BR in eine leere A-dec Bottle Flasche geben.
3. Öffnen Sie alle Auslässe der wasserverbrauchenden Geräte und Ventile, wie Instrumentenschläuche, Becherfüller und Ringspülung.
4. Warten Sie, bis die lilafarbene Flüssigkeit aus allen Auslässen fließt.



5. Schließen Sie nun alle Auslässe der wasserverbrauchenden Geräte und Ventile.
6. Die Einwirkungszeit / Dekontaminationszeit beträgt 30 Minuten!
7. Gießen Sie den Rest des GREEN&CLEAN BR aus der Flasche in das Speibecken.
8. Füllen Sie die leere A-dec Bottle mit klarem Wasser.
9. Aktivieren Sie nach Ablauf der Einwirkungszeit alle Auslässe der wasserverbrauchenden Geräte und Ventile, bis klares Wasser hinausfließt.

